

Bossklein®

i-RANGE

Bezalkoholové desinfekční ubrousky na povrchy

Návod k použití

Dóza

Náhradní balení

	<p>1. Odstraňte víčko.</p>		<p>1. Náhradní balení ubrousků lze použít s dózou nebo bez ní. U sáčků bez ziplocku zajistěte, aby byl mezi použitím sáčků uzavřen tak, aby se zabránilo odpařování.</p>
	<p>2. Odřízněte plastové pouzdro přes horní část sáčku.</p>		<p>2. Odřízněte plastové pouzdro přes horní část sáčku.</p>
	<p>3. Vytáhněte desinfekční ubrousek středním otvorem víčka a dózu uzavřete. Ubrousky vytahujte dle potřeby v úhlu 45°.</p>		<p>3. Pokud se rozhodnete umístit náhradní balení do dózy, pak vytáhněte desinfekční ubrousek středním otvorem víčka a dózu uzavřete. Ubrousky vytahujte dle potřeby v úhlu 45°.</p>
	<p>4. Vždy používejte nový ubrousek pro každou desinfekci. Otřete ubrouskem všechny objekty, které mají být dezinfikovány tak, aby byly zcela navlhčené.</p>		<p>4. Vždy používejte nový ubrousek pro každou desinfekci. Otřete ubrouskem všechny objekty, které mají být dezinfikovány tak, aby byly zcela navlhčené..</p>
 <p>30 sec</p>	<p>5. Nechte desinfekční prostředek působit minimálně 30 vteřin, což umožní odpaření povrchové vlhkosti. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Pouze pro profesionální použití.</p>	 <p>30 sec</p>	<p>5. Nechte desinfekční prostředek působit minimálně 30 vteřin, což umožní odpaření povrchové vlhkosti. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Pouze pro profesionální použití.</p>