

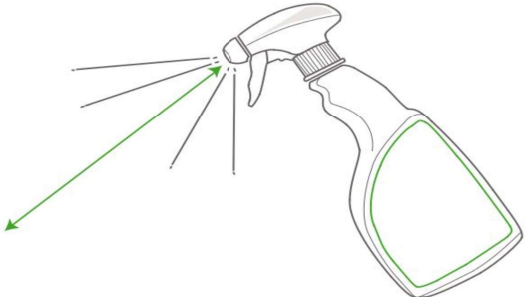

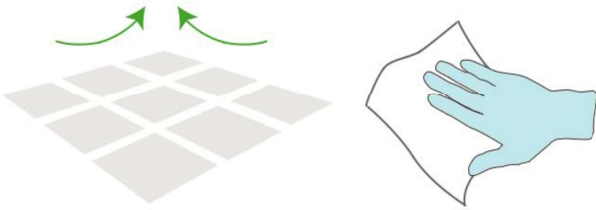

Bossklein®

i-RANGE

Alkoholový desinfekční sprej na povrchy

Návod k použití

Pro povrchovou dezinfekci citlivých zdravotnických prostředků..

	<p>1. Postříkejte všechny povrchy a předměty, které mají být dezinfikovány, ze vzdálenosti cca. 30 cm tak, aby byly zcela navlhčené.</p>
 <p>60 sec</p>	<p>2. Nechte desinfekční prostředek působit minimálně 60 sekund.</p>
	<p>3. Povrch nechte vyschnout, nebo otřete čistou tkaninou.</p>
	<p>4. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Pouze pro profesionální použití.</p>