

#whsterilization



wh.com



bepro

suction CD

Technický protokol

ÚČEL POUŽITÍ

Kapalný koncentrát se zvýšeným dezinfekčním účinkem ke každodennímu čištění a údržbě zubních aspiračních systémů se separátorem amalgámu či bez něj.

APLIKACE

K zajištění spolehlivého čištění, dezinfekce a údržby doporučujeme BePro Suction CD aplikovat 1-2x denně (např. v poledne a večer) tři po sobě jdoucí pracovní dny. Po zbývajících 2 pracovní dny v týdnu je aplikace prostředku BePro Suction CM doporučena.

Manuální použití se směšovací nádobou BePro Suction Mixing Cup:

Na jednu aplikaci jsou zapotřebí 2 litry 2% roztoku připraveného k použití. Nadávkujte 2 x 20 ml koncentrátu do směšovací nádoby BePro Suction Mixing Cup a doplňte vodou do dvou litrů. K ředění doporučujeme použít vodu o teplotě 40–50 °C. Litr roztoku připraveného k použití odsajte aspiračními hadičkami, zbývajících litr nalijte do plivátka. Nechte roztok působit nejméně 60 minut a těsně před zahájením práce hadičky a plivátko důkladně vypláchněte vodou.

Systémy s integrovaným chemickým čištěním hadiček:

Koncentrát nalijte přímo do nádržky systému na čisticí prostředek. Upravte směšovací poměr na 2 %. Podrobnosti naleznete v návodu výrobce.

Klinické údaje:*

- Dr. H. Brill, Hamburg, VAH a normy EN 14561 + EN 14562, 2006-10;
- Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt/M., VAH, 2007-02;
- Dr. J. Höffler, Hamburg, EN 13624 + EN 13727, 2009-05;
- Dr. J. Steinmann, Bremen, HBsAg-procedure, 2003-10; BVDV, 2003-11; Vaccinia, 2006-04; Adeno, 2006-05.

*Názor znalce dle norem EN, při znečištění a pokojové teplotě.

ÚČINNOST/CERTIFIKACE

- Baktericidní: (EN 13727);
- Protikvasinková: praktická zkouška ve znečištěných podmínkách (EN 13624);
- Inaktivace virů: virucidní aktivita s omezeným spektrem podle EN 16777 proti neobaleným adeno- a norovirům, jakož i všem obaleným krevním virům – HBV, HCV, HIV a chřipce;
- Certifikováno Asociací pro aplikovanou hygienu (VAH) a Německou společností pro hygienu a mikrobiologii (DGHM); splňuje požadavky DGHM a EN normy na dezinfekci nástrojů.

ZÁKLAD AKTIVNÍ LÁTKY

Vysoce účinný čisticí koncentrát bez aldehydů, fenolů a chlóru s rozšířeným dezinfekčním účinkem na bázi kvarterních amoniových solí, aminů, tenzidů a alkalických látek.

#whsterilization



wh.com



bepro

suction CD

Technický protokol

KOMPATIBILITA

Velmi dobrá kompatibilita s různými materiály. Použití schváleno předními výrobci zdravotnických prostředků.

BALENÍ

19500254	Kanistr 5 litrů
----------	-----------------

#whsterilization



wh.com



bepro

suction CD

Technický protokol



ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstr. 9 | 78112 St. Georgen | Německo

www.alpro-medical.com |



W&H Sterilization Srl

Via Bolgara 2 | 24060 Brusaporto (BG) | Itálie

www.wh.com | office.sterilization@wh.com