

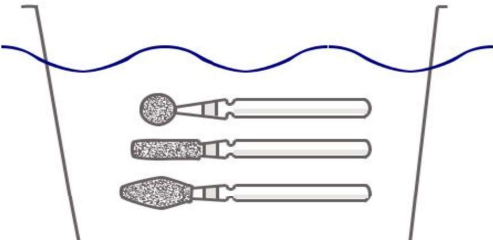

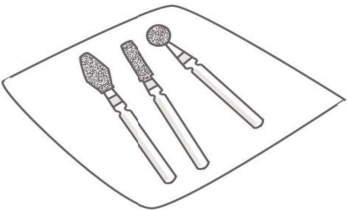

# Bossklein®

# i-RANGE

## DisBur – Desinfekční prostředek na rotační nástroje

### Návod k použití

2 L láhev

	<p>1. Desinfekční prostředek je připraven k okamžitému použití. Nástroje určené k desinfekci ponořte do roztoku.</p>
 <p>30 minut</p>	<p>2. Minimální doba namáčení je 5 minut (baktericidní, kvasinkové, virové). Maximální doba namáčení je 30 minut (fungicidní).</p>
	<p>3. Nástroje neoplachujte, nechte je volně uschnout buď na papírové utěrce, nebo tkanině.</p>
	<p>4. Nepřekračujte maximální dobu namáčení 30 minut. Roztok měňte denně, nebo dle znečištění. Nepoužívejte na nástroje obsahující mosazné, měděné, hliníkové, nebo barevně označené části. Používejte pouze pro alkalické a alkoholově kompatibilní materiály. Pouze pro profesionální použití.</p>